

	HASTALAR İÇİN İMPLANT BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ (IMPLANT INFORMATION BROCHURE FOR PATIENTS)	Doküman No / Document No: TD.01.IIBFP.01-Türkish
		Yayın Tarihi / Issue Date: 30.06.2026
		Revizyon No /Revision No: 00
		Revizyon Tarihi / Revision Date: .../.../...

HASTALAR İÇİN İMPLANT BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

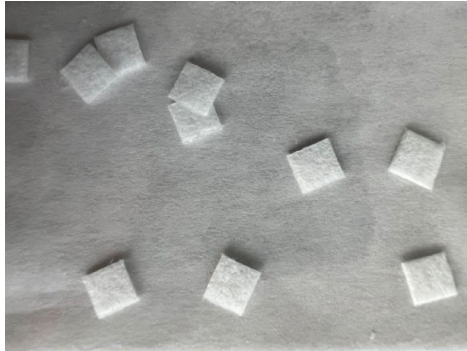
PTFE FELT – FELT STRIP – FELT PLEDGET

Bu hasta bilgilendirme broşürü, GEMED™ PTFE Felt, Felt Strip, Felt Pledget hakkında daha iyi bilgi sahibi olmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu broşür, hastaların sıklıkla sorduğu bazı soruları yanıtlasada, sağlık uzmanınızın tıbbi tavsiyesinin yerini alması amaçlanmamıştır. Bu broşürü okurken herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bunları not alın ve sağlık uzmanınızla görüşün. Her hastanın farklı olduğunu unutmamak önemlidir. Yalnızca sağlık uzmanınız size özel tedavinizin ayrıntıları hakkında bilgi verebilir. Lütfen bu broşürü dikkatlice okuyunuz ve ileride ihtiyaç duyabileceğiniz için saklayınız.

Bu implant nedir ve neyden yapılmıştır?

Size uygulanan implant **PTFE (Politetrafloroetilen) Felt, Strip veya Pledget** isimli bir tıbbi cihazdır. Bu implant, özellikle **kalp ve damar cerrahisinde**, cerrah tarafından dikiş (sütür) hattını desteklemek amacıyla kullanılır. İmplantın görevi, ameliyat sırasında oluşturulan sütür hattına **mekanik destek sağlamak**, dokunun yırtılmasını veya sütürün dokuyu kesmesini önlemeye yardımcı olmak ve cerrahi onarımın güvenliğini desteklemektir. Ürün herhangi bir ilaç içermez ve farmakolojik, immünolojik veya metabolik bir etki göstermez; etkisini tamamen fiziksel (mekanik) destek sağlayarak gerçekleştirir. GEMED™ PTFE Felt, Felt Strip, Felt Pledget 100 politetrafluoroetilen (PTFE) malzemeden üretilmiştir. Bu malzeme inerttir ve herhangi bir alerjik reaksiyona neden olduğu bilinmemektedir.

Ürün Görseli

PTFE FELT	PTFE FELT PLEDGET	PTFE FELT STRIP
		

İmplant neden kullanılmıştır?

Cerrahiniz bu implantı; Kalp ve damar cerrahisi sırasında, dikiş hattını güçlendirmek, dokunun yırtılmasını önlemeye yardımcı olmak, cerrahi onarımın güvenliğini desteklemek amacıyla kullanmıştır. Cihazınızın yeri veya kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen sağlık uzmanınızla iletişime geçin.

İmplant vücudumda nasıl çalışır?

	HASTALAR İÇİN İMPLANT BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ (IMPLANT INFORMATION BROCHURE FOR PATIENTS)	Doküman No / Document No: TD.01.IIBFP.01-Türkish
		Yayın Tarihi / Issue Date: 30.06.2026
		Revizyon No / Revision No: 00
		Revizyon Tarihi / Revision Date: .../.../...

İmplant, yerleştirildiği bölgede dikiş hattına mekanik destek sağlar. Herhangi bir ilaç salmaz, vücutta elektriksel bir etki oluşturmaz ve aktif olarak çalışan bir cihaz değildir.

İmplantım ne zaman kullanılmamalıdır (Kullanım Kontrendikasyonları)?

Bu cihazların kullanımını engelleyecek bilinen bir neden yoktur. Sağlık uzmanınız, bu cihazların sizin için uygun olup olmadığını belirleyecektir.

İmplant kartınızı neden saklamalısınız?

Size verilen implant kartı; kullanılan implantın tanımlanmasını, gerektiğinde ürün bilgilerinin hızlı şekilde doğrulanmasını, gelecekte yapılabilecek tıbbi işlemlerde sağlık personelinin doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İmplant kartınızı güvenli bir yerde saklayınız ve sağlık kuruluşuna başvurduğunuzda yanınızda bulundurunuz.

Gelecekte başka bir ameliyat veya tedavi olursanız

Doktorunuza veya diğer sağlık personeline; bu implantın bulunduğunu, implant kartınızı, bu broşürü gösteriniz. Bu bilgi gelecekte planlanacak tıbbi işlemler açısından önemlidir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

Ürün PTFE esaslı olup metalik bileşen içermez. Bu nedenle manyetik alanla etkileşime girecek metalik yapı içermez. MRG veya diğer görüntüleme işlemleri öncesinde sağlık personeline implantınız bulunduğunu bildiriniz.

İmplantınız ile ilgili tıbbi takip

Ameliyat sonrası kontrollerinizi doktorunuzun önerdiği şekilde sürdürünüz. İmplantınız hakkında sorularınız olduğunda veya sağlık durumunuzla ilgili değerlendirme gerektiğinde doktorunuza danışınız.

Bilmeniz gereken önemli hususlar

Bu implant yalnızca cerrah tarafından uygulanır. İmplant tek kullanımlıktır. İmplantın tekrar kullanılması veya tekrar steril edilmesi mümkün değildir.

Kimler için uygun değildir?

Bu implant; PTFE'ye karşı bilinen alerjisi bulunan kişilerde kullanılmamalıdır. Bu değerlendirme cerrahınız tarafından ameliyat öncesinde yapılmaktadır.

Tıbbi İşlem Sonrası Yaşam

İyileşme sürecinde neler beklemelisiniz?

İyileşme süresinin kesin uzunluğu, yaşıınız ve genel sağlık durumunuz gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu implantlar, iyileşme sürenizi etkilemez veya işleminiz için gerekli olanın ötesinde özel bir izleme ya da takip gerektirmemektedir. İşleminize ilişkin spesifik iyileşme beklentileri hakkında lütfen sağlık hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.

	HASTALAR İÇİN İMPLANT BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ (IMPLANT INFORMATION BROCHURE FOR PATIENTS)	Doküman No / Document No: TD.01.IIBFP.01-Türkish
		Yayın Tarihi / Issue Date: 30.06.2026
		Revizyon No /Revision No: 00
		Revizyon Tarihi / Revision Date: .../.../...

GEMED™ PTFE Felt, Felt Strip, Felt Pledget ürünün vücudunuzda fonksiyonel ömrü ne kadardır?

Ameliyat sonrasında dokularınızın iyileşmesi ve desteklenmesi için bu ürünün fonksiyonel görev süresi 2 ila 4 hafta (yaklaşık 1 ay) kadardır. Bu süre zarfında vücudunuzun o bölgedeki doğal iyileşme süreci tamamlanır, dokularınız tamamen bütünleşir ve onarılan alan artık dışarıdan bir destek almadan kendi yükünü taşıyabilir hale gelir.

Ürün vücudunuzda ne kadar süre kalır ve bozulur mu?

Ürünün yapımında kullanılan PTFE isimli özel malzeme, vücut içinde tamamen dayanıklıdır. Vücut sıvılarıyla reaksiyona girmez; erimez, çürümez ve yapısı kesinlikle bozulmaz. Klinik veriler, bu ürünün ömür boyu vücudunuzda hiçbir aşınmaya veya yıpranmaya uğramadan, tamamen güvenli ve vücudunuzla uyumlu bir şekilde kalmaya devam ettiğini göstermektedir.

İmplantımla Yaşamak

İşleminizden sonra kaçınmanız gereken kısıtlamalar, sınırlamalar veya günlük aktiviteler hakkında lütfen sağlık uzmanınıza danışın.

İmplantım çıkarılabilir mi?

GEMED™ PTFE Felt, Felt Strip, Felt Pledget kalıcı implantlar olarak tasarlanmıştır. Cerrahi işlem sırasında yerleştirildikten sonra vücutta kalacak şekilde tasarlanmıştır ve normal koşullarda ömür boyu vücudunuzda kalması amaçlanmaktadır. Ürün, cerrahi iyileşme sürecinde fonksiyonel görevini tamamladıktan sonra da bulunduğu bölgede güvenli bir şekilde kalmaya devam eder. Bu nedenle rutin olarak çıkarılması planlanmaz ve ancak tıbbi gereklilik oluşması halinde yeniden yapılacak bir cerrahi girişim sırasında değerlendirilebilir.

İmplant hakkında daha fazla bilgi

İmplantınız hakkında sorularınız varsa doktorunuza danışınız.

Üretici ile iletişime geçmek isterseniz:

GEMED Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Telefon: +90 (216) 452 35 25

E-posta: info@gemed.com.tr

Web: www.gemed.com.tr

Önemli Hatırlatma

- ✓ İmplant kartınızı kaybetmeyiniz.
- ✓ Sağlık kuruluşuna başvurduğunuzda implant kartınızı gösteriniz.
- ✓ Bu broşürü ileride ihtiyaç duyabileceğiniz için saklayınız.

	HASTALAR İÇİN İMPLANT BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ (IMPLANT INFORMATION BROCHURE FOR PATIENTS)	Doküman No / Document No: TD.01.IIBFP.01-Türkish
		Yayın Tarihi / Issue Date: 30.06.2026
		Revizyon No / Revision No: 00
		Revizyon Tarihi / Revision Date: .../.../...

Bu broşür, Avrupa Birliği 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Regülasyonu (MDR) Madde 18 uyarınca implant uygulanan hastaların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu broşür, doktorunuzun önerilerinin yerine geçmez ve tıbbi tavsiye niteliği taşımaz. Tedaviniz ve takip süreciniz ile ilgili kararlar doktorunuz tarafından verilecektir.